

# PM BUTTERFLY®

*Técnica Cirúrgica*

CE  
MARK

ISO  
13485 : 2016

[www.morebr.com.br](http://www.morebr.com.br)  
[www.neuro-france.net](http://www.neuro-france.net)



## NEURO FRANCE Implants

ZA «le Bourg» - 25 rue des Ecoles 41160 La Ville aux Clercs - FRANCE  
Tel : +33 2 54 80 90 90 - Fax : +33 2 54 80 83 33  
E-mail : neurofrance@neuro-france.net

Av. Luiz Eduardo de Toledo Prado, nº 900, Sala 619/62, Vila do Golf – Ribeirão Preto – SP, CEP: 14027250  
Tel : (16) 3904-3838 - E-mail: comercial@morebr.com.br  
Instagram: more4experts

**MORE**

TÉCNICA CIRÚRGICA

*p.3*

IMPLANTES


*p.9*

INSTRUMENTAIS

*p.10*

## INSTALAÇÃO


A operação é feita sob anestesia geral e por abordagem anterior.

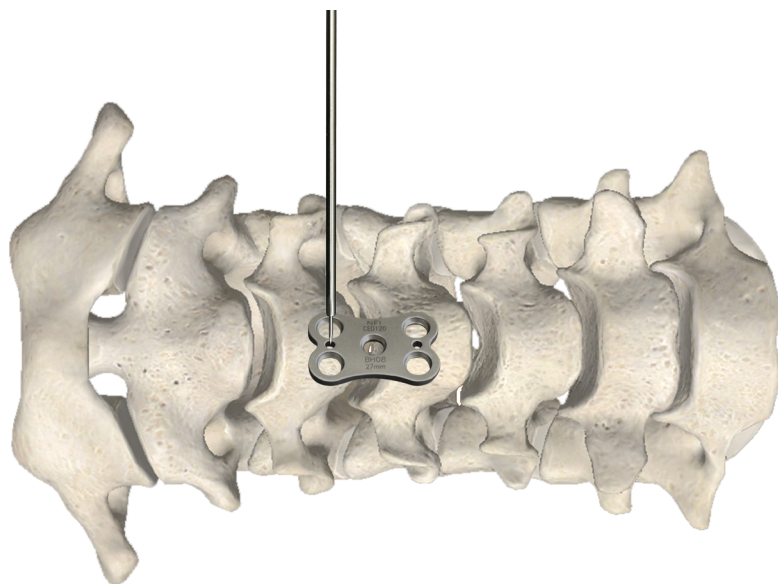

### PASSO 1

Posicione a placa PM BUTTERFLY® no local desejado.


Uma vez posicionada, bloqueie-a com o pino, para estabilizá-la na coluna.

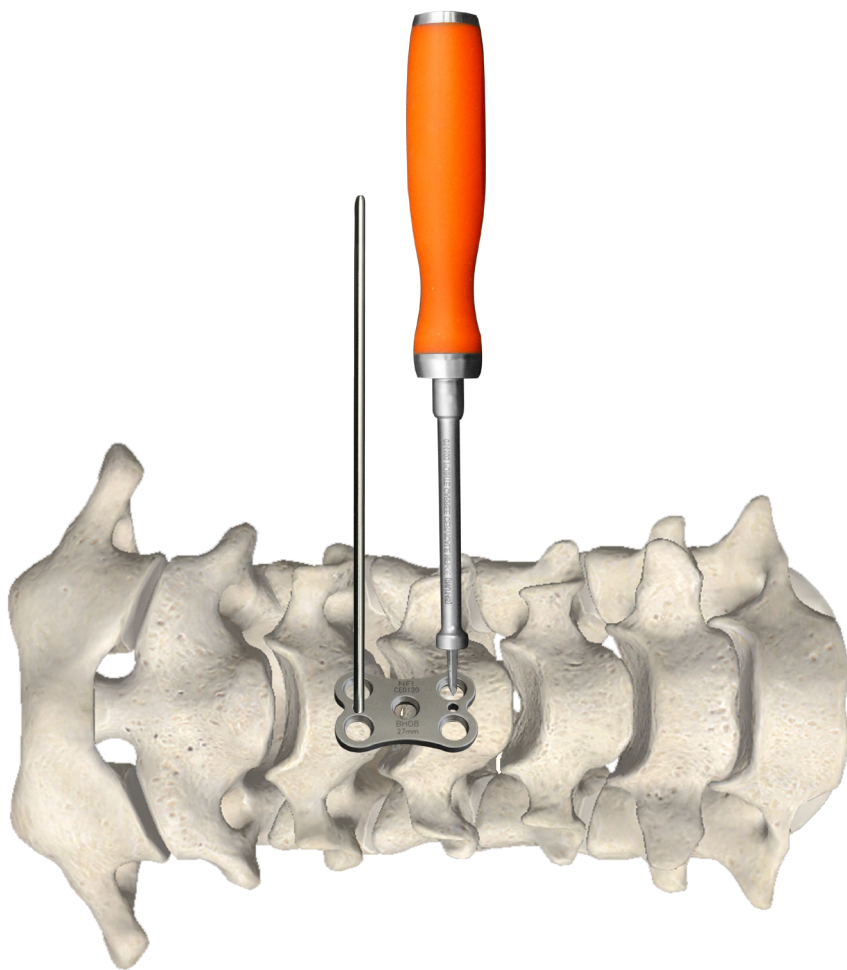

### PASSO 2

Introduza o iniciador cervical com bloqueio para garantir uma perfuração inicial no osso cortical para então preparar a inserção dos parafusos.


Repita essa ação para os demais 3 pontos nos quais os parafusos serão inseridos.

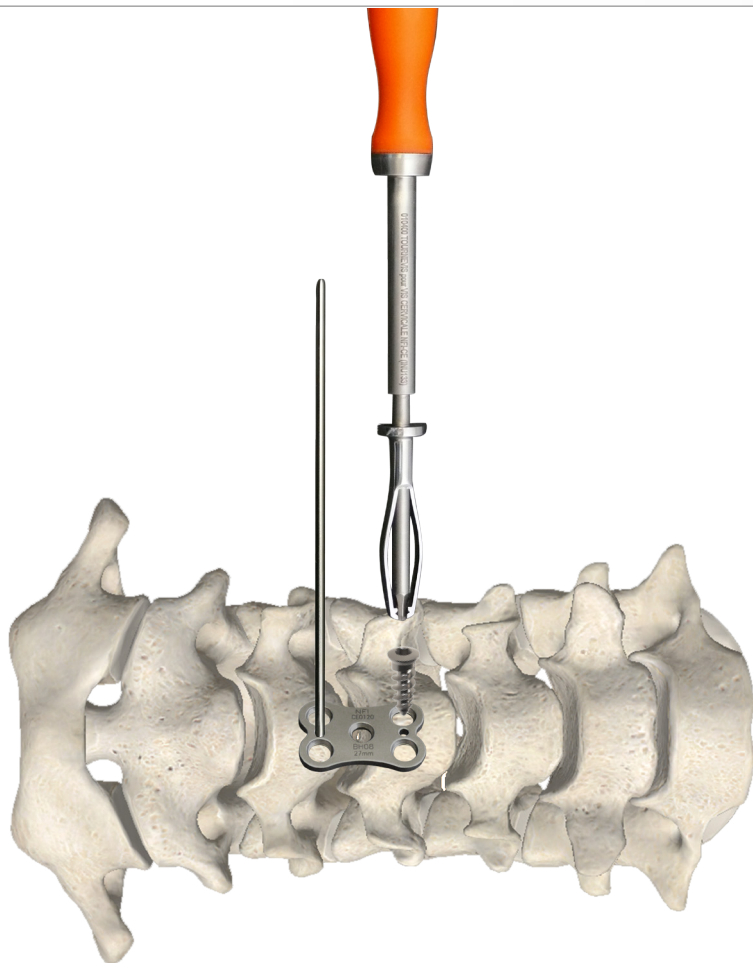


### PASSO 3

Graças a Chave Hexagonal com Pinça Ø 2,5mm, segure o parafuso STABILAR.

O parafuso deverá ser posicionado no furo da placa.

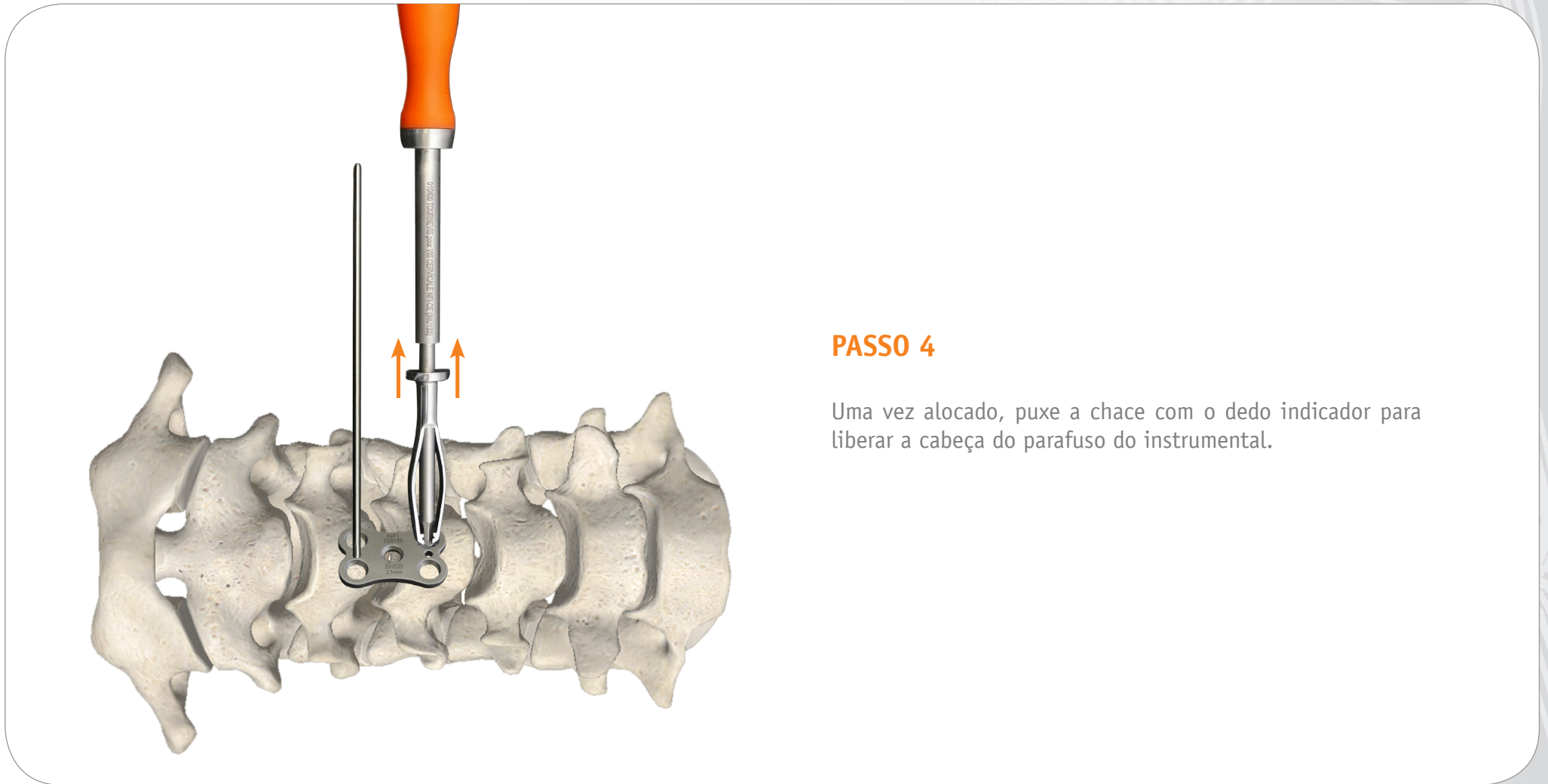


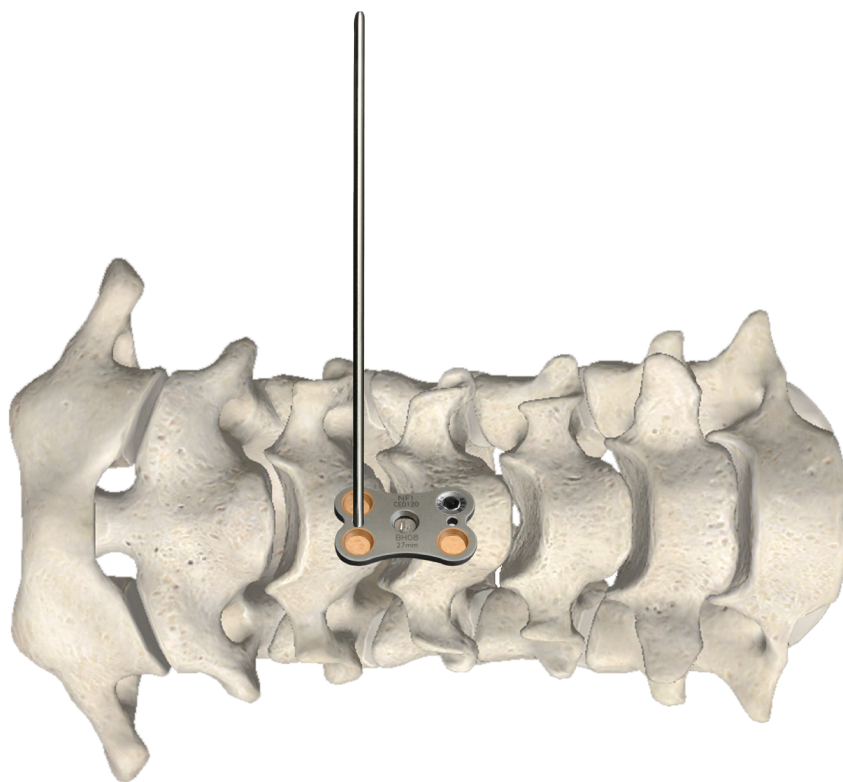

### PASSO 5

Repita a operação para com os demais 3 parafusos.

Nota : Quando utilizar os parafusos STABILAR® com bloqueio, coloque os parafusos na posição correta antes de fazer o aperto final.

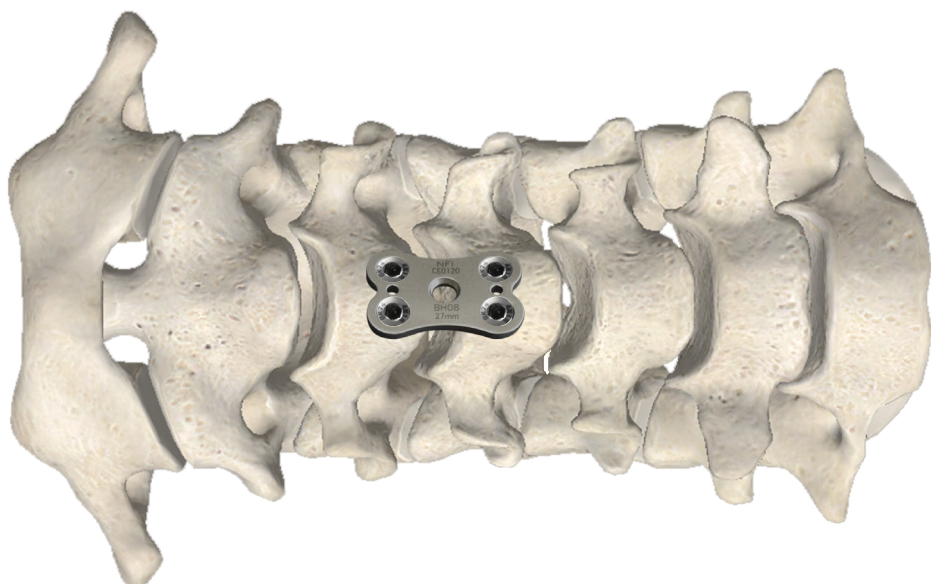

## PASSO 6

Uma vez que o aperto final foi feito, remova o pino da placa PM BUTTERFLY®.


A placa está devidamente fixada.

Escaneie para  
o **VER** da Técnica  
**CIRÚRGICA**




Faça o download de um *scanner de QR Code* (ou qualquer leitor de código de barras) para ler este código.



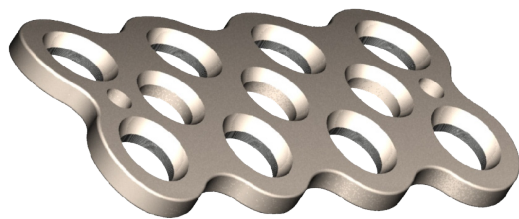

Placa PM BUTTERFLY®  
Item n° : 482XXX

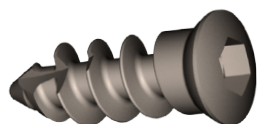

Parafuso STABILAR®  
Item n° : 1140XX, 1340XX, 1345XX or 1440XX



Chave Hexagonal com Pinça Ø  
2,5mm para parafusos STABILAR®  
Item n° : 010400



Pino de Fixação para Placa PM  
BUTTERFLY®  
Item n° : 012410



Modelador de Placa Cervical Item  
n° : 011240



Pinça para Parafuso  
Item n° : 010412



Iniciador Cervical com Bloqueio  
Item n° : 014103



Your partner in spine surgery

# NEURO FRANCE Implants



Fabricante e designer de implantes par cirurgias de coluna  
[www.neuro-france.net](http://www.neuro-france.net)

Distribuído por :



Av. Luiz Eduardo de Toledo Prado, nº 900, Sala 619/62, Vila do  
Golf – Ribeirão Preto – SP, CEP: 14027250  
Tel : (16) 3904-3838 - E-mail: [comercial@morebr.com.br](mailto:comercial@morebr.com.br)  
[www.morebr.com.br](http://www.morebr.com.br)



more4experts



**ESCANEE O**  
Q-R CODE PARA  
visitar o  
nosso **SITE**

Faça o **DOWNLOAD** de um aplicativo **LEITOR DE QR CODE** para ler este código.