

PM CAGE®

Técnica Cirúrgica

CE
MARK

ISO
13485 : 2016

www.morebr.com.br
www.neuro-france.net



NEURO FRANCE Implants

ZA «le Bourg» - 25 rue des Ecoles 41160 La Ville aux Clercs - FRANCE
Tel : +33 2 54 80 90 90 - Fax : +33 2 54 80 83 33
E-mail : neurofrance@neuro-france.net

Av. Luiz Eduardo de Toledo Prado, nº 900, Sala 619/62, Vila do Golf – Ribeirão Preto – SP, CEP: 14027250
Tel : (16) 3904-3838 - E-mail: comercial@morebr.com.br
Instagram: more4experts

MORE

PASSO 1 - *Inserindo o equipamento de distração* p.3

PASSO 2 - *Preparando a área vertebral* p.5

PASSO 3 - *Identificação do tamanho do cage a ser utilizado* p.6

PASSO 4 - *Preparação e introdução do PM CAGE®* p.7

PASSO 5 - *Aperfeiçoar a posição do cage* p.9

Link para o vídeo da técnica Cirúrgica p.10

Implantes PM CAGE® p.11

INSTALAÇÃO

O paciente é posicionado de barriga para cima.
A intervenção é realizada por anestesia geral. A abordagem cirúrgica é via anterior.

PASSO 1

Após a dissecação convencional utilizando a Chave Caspar (nº : 012305), insira o Pino Caspar (nº : 01231X) no centro do corpo vertebral superior e inferior.




4

Técnica Cirúrgica

PM CAGE®


Posicione a Pinça Distratora Caspar (nº : 012300) nos dois Pinos Caspar.

Realize a distração para abrir o espaço intersomático. Para o fazer, gire o disco da pinça distratora até obter o espaço intervertebral desejado.

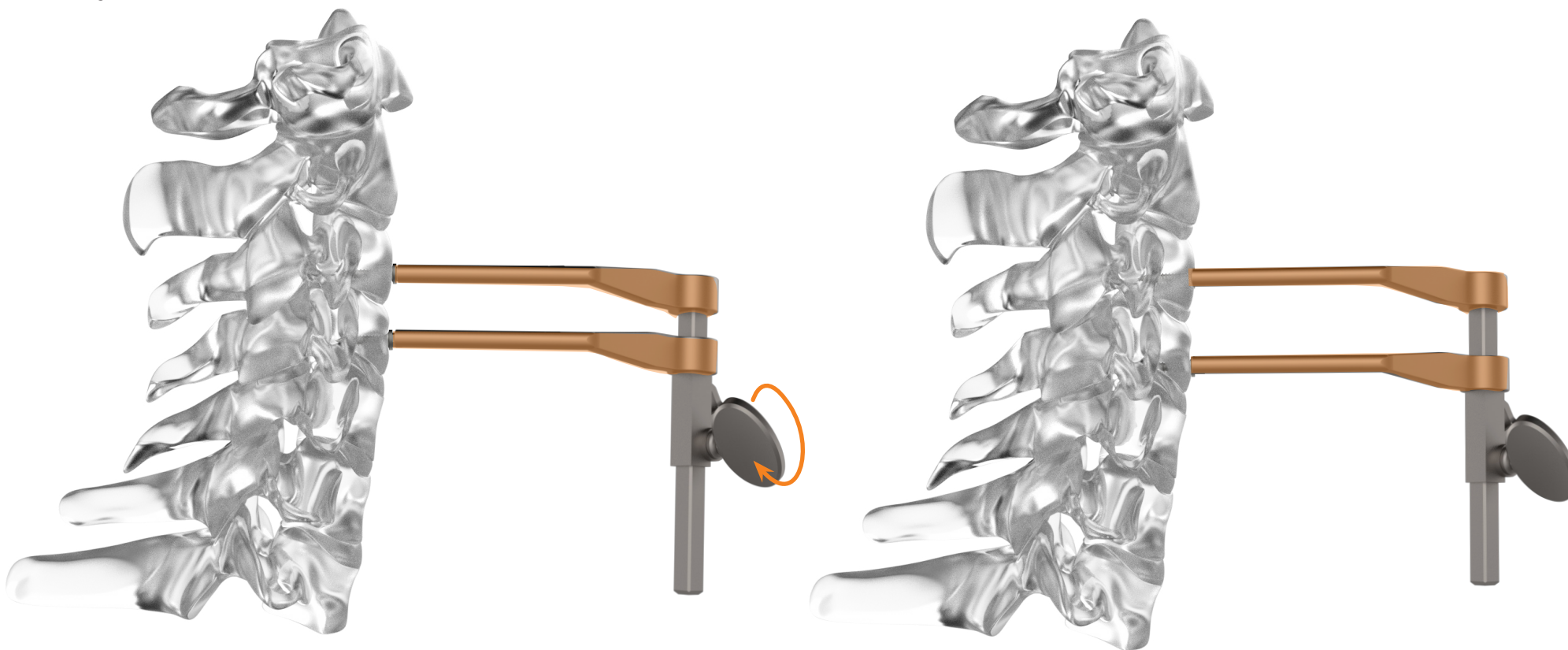

PASSO 2


Realize a dissectomia utilizando a pinça de disco e então afie a vértebra com a cureta.

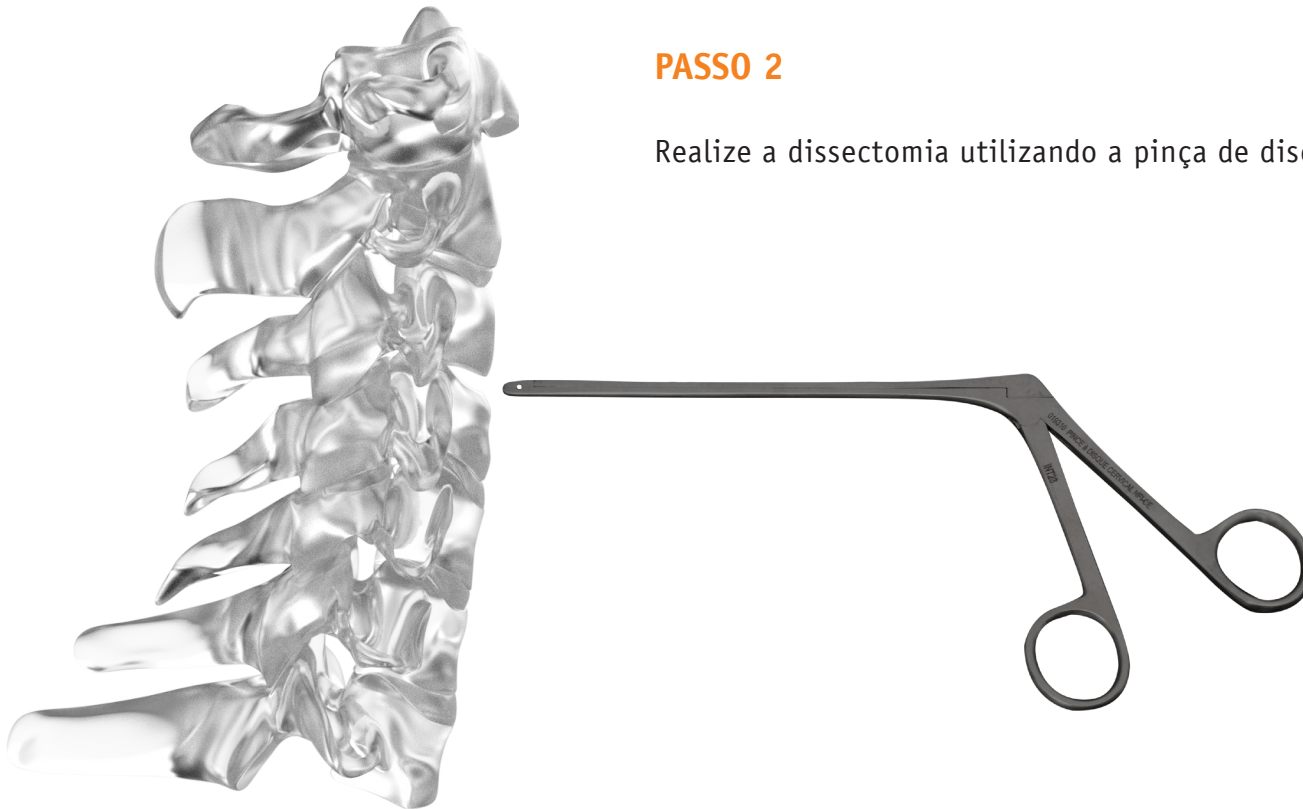

PASSO 3

Após uma perfeita dissetomia e liberação dos elementos de compressão, insira o menor tamanho de Prova PM CAGE® no espaço intervertebral.


Remova a Pinça Distratora para checar a firmeza da prova entre os corpos vertebrais.

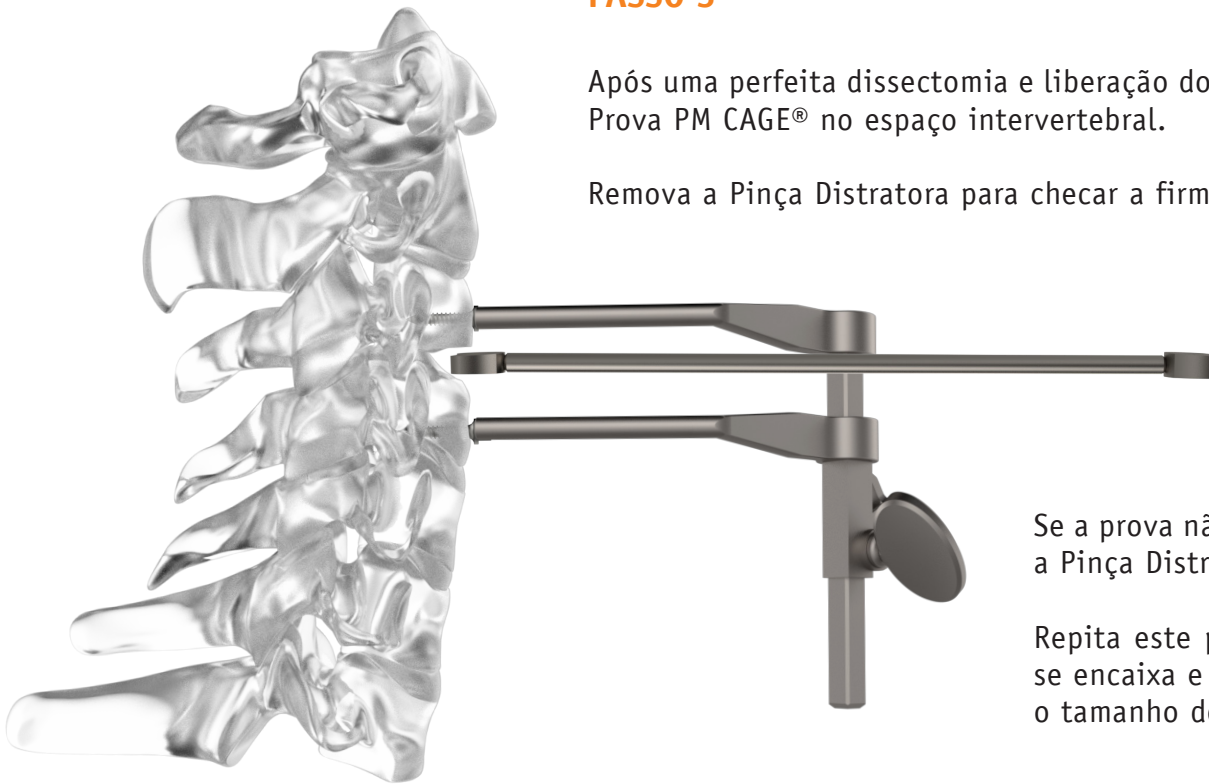


Se a prova não tiver firme, abra novamente os corpos vertebrais com a Pinça Distratora e insira um tamanho maior.

Repita este passo até encontrar o tamanho apropriado que melhor se encaixa e garanta uma perfeita estabilização. A prova determina o tamanho do cage a ser utilizado.


1

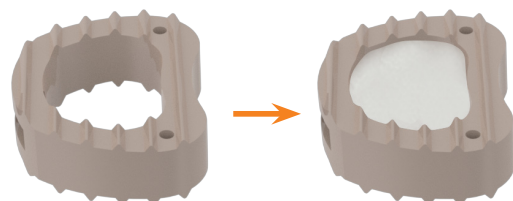

2

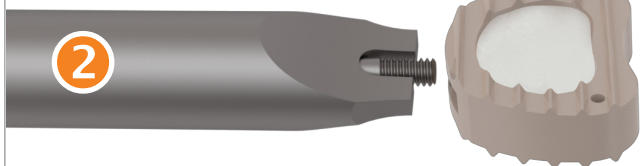

3

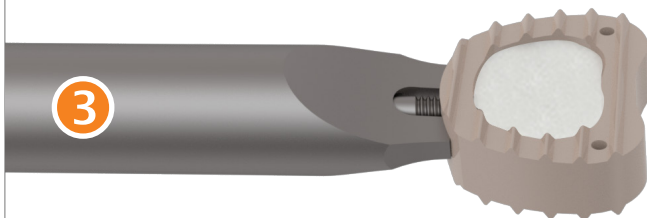**PASSO 4**

Primeiramente, introduza o enxerto ósseo no centro do cage.

E então, fixe o cage no Inserto para Cage (item n° : 010910) para facilitar sua introdução no espaço intersomático.

AVISO :

NUNCA USE O INSERTO COMO UM IMPACTOR.



DURANTE A DISTRAÇÃO, insira o implante de fusão na mesma posição da Prova.

AVISO :

NUNCA INSIRA O PM CAGE SEM ANTES REALIZAR A DISTRAÇÃO

PASSO 5

Uma vez inserido, se necessário, use o impactor para a perfeita alocação do cage.





Retire a Pinça Distratora e remova os Pinos Caspar com a Chave Caspar.

O sistema PM CAGE® está corretamente instalado.

Escaneie para
o **VER**
VÍDEO da Técnica
CIRÚRGICA



Faça o download de um *scanner de QR Code* (ou qualquer leitor de código de barras) para ler este código.

PM CAGE® PEQUENO

PM CAGE® PEQUENO (PEEK OPTIMA®)
Item n° : 6113XX



PM CAGE® PEQUENO (Ti 6-Al 4-V)
Item n° : 6213XX

PM CAGE® GRANDE

PM CAGE® GRANDE (PEEK OPTIMA®)
Item n° : 6115XX



PM CAGE® GRANDE (Ti 6-Al 4-V)
Item n° : 6215XX

Your partner in spine surgery

NEURO FRANCE Implants



Fabricante e designer de implantes par cirurgias de coluna
www.neuro-france.net

Distribuído por :



Av. Luiz Eduardo de Toledo Prado, nº 900, Sala 619/62, Vila do
Golf – Ribeirão Preto – SP, CEP: 14027250
Tel : (16) 3904-3838 - E-mail: comercial@morebr.com.br
www.morebr.com.br



more4experts



ESCANIEIE O
Q-R CODE PARA
visitar o
nosso **SITE**

Faça o **DOWNLOAD** de um aplicativo **LEITOR DE QR CODE** para ler este código.