


STABILAR[®] PCP

Técnica Cirúrgica

CE
MARK

ISO
13485 : 2016

www.morebr.com.br
www.neuro-france.net

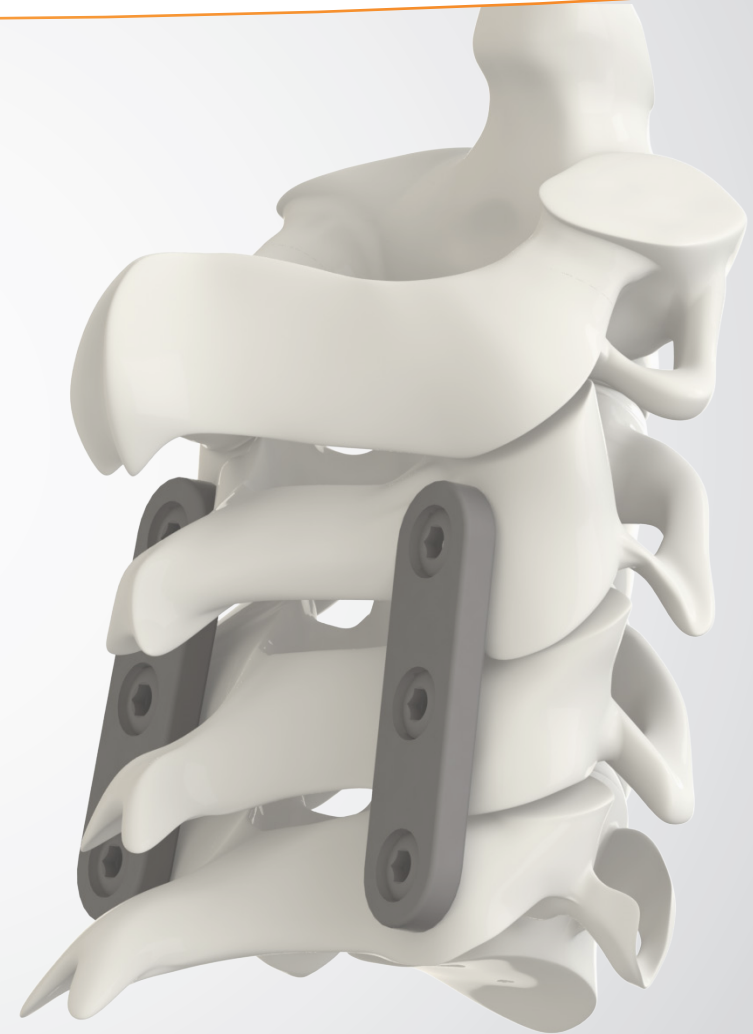

NEURO FRANCE Implants

ZA «le Bourg» - 25 rue des Ecoles 41160 La Ville aux Clercs - FRANCE
Tel : +33 2 54 80 90 90 - Fax : +33 2 54 80 83 33
E-mail : neurofrance@neuro-france.net

Av. Luiz Eduardo de Toledo Prado, nº 900, Sala 619/62, Vila do Golf – Ribeirão Preto – SP, CEP: 14027250
Tel : (16) 3904-3838 - E-mail: comercial@morebr.com.br
Instagram: more4experts

MORE

TÉCNICA CIRÚRGICA

p.3

IMPLANTES


p.9

INSTRUMENTAIS

p.10

INSTALAÇÃO

O paciente é posicionado em posição decúbito ventral. Se atente para não ocasionar compressão abdominal. A cirurgia é realizada sob efeito de anestesia geral, por abordagem anterior.

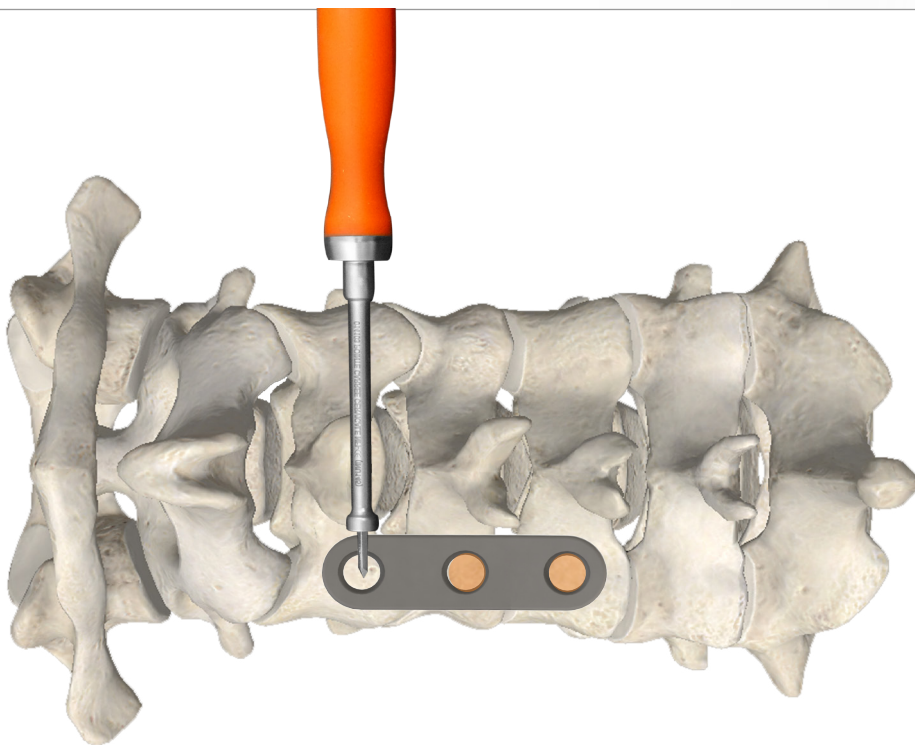


PASSO 1

Posicione a Placa STABILAR® PCP no local desejado.

Introduza o Iniciador cervical com bloqueio para realizar um buraco no osso cortical e preparar a inserção do parafuso.

Repita essa operação para os dois outros locais onde os parafusos serão inseridos.

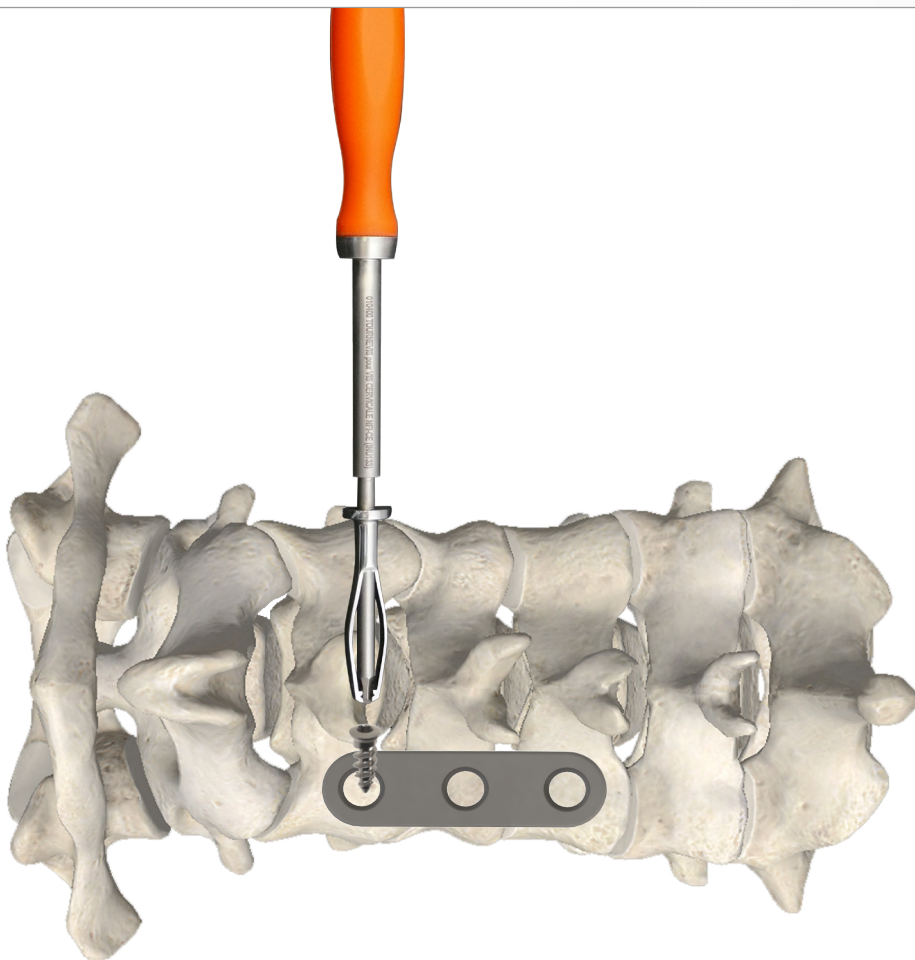

PASSO 2

Graças a Chave Hexagonal com Pinça de Ø 2,5 mm segure o parafuso STABILAR®.


Por conta do mecanismo da chave, o parafuso fica suspenso, e não cai.

Coloque o parafuso no primeiro furo.

5


Técnica Cirúrgica

STABILAR® PCP

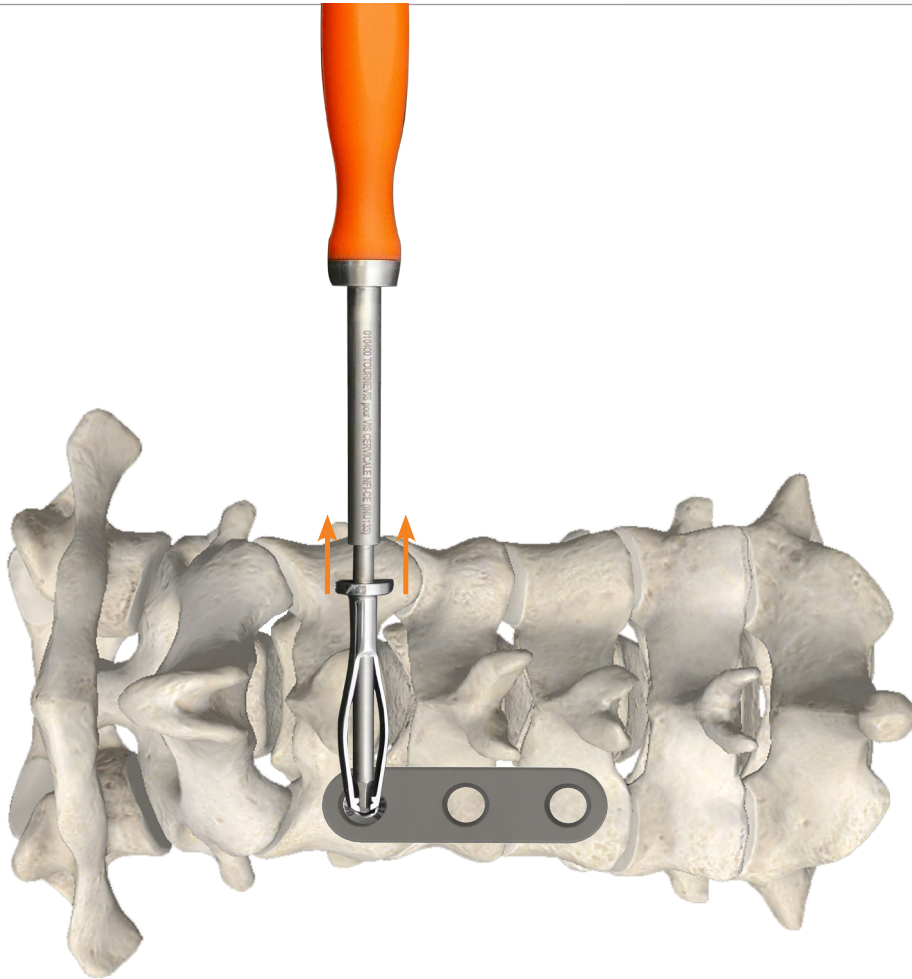

PASSO 3


Uma vez inserido, puxe a chave com o auxílio do dedo indicador, removendo-a da cabeça do parafuso.

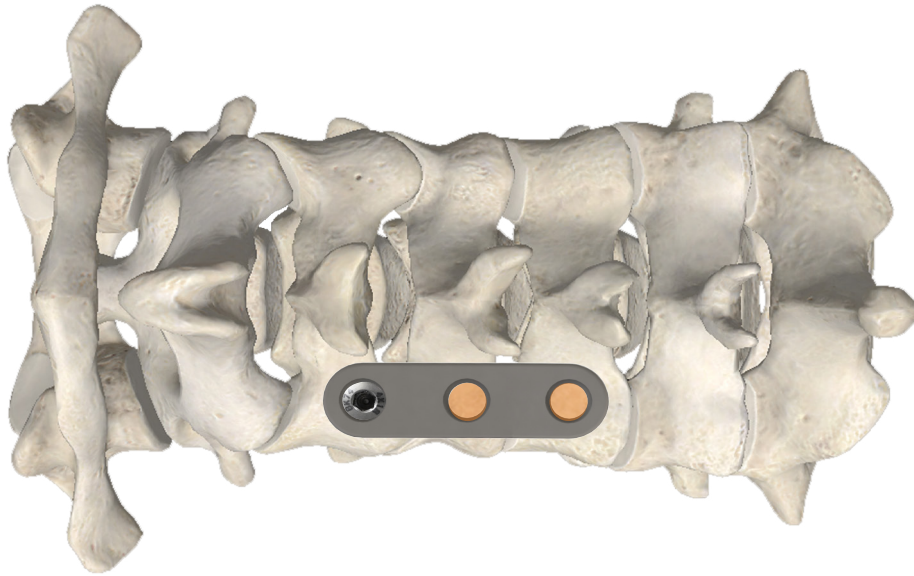

PASSO 4

Repita esta atividade para com os outros parafusos.


Nota : Quando utilizaar os parafusos STABILAR® com bloqueio, coloque os parafusos nos devidos lugares antes de realizar o aperto final.

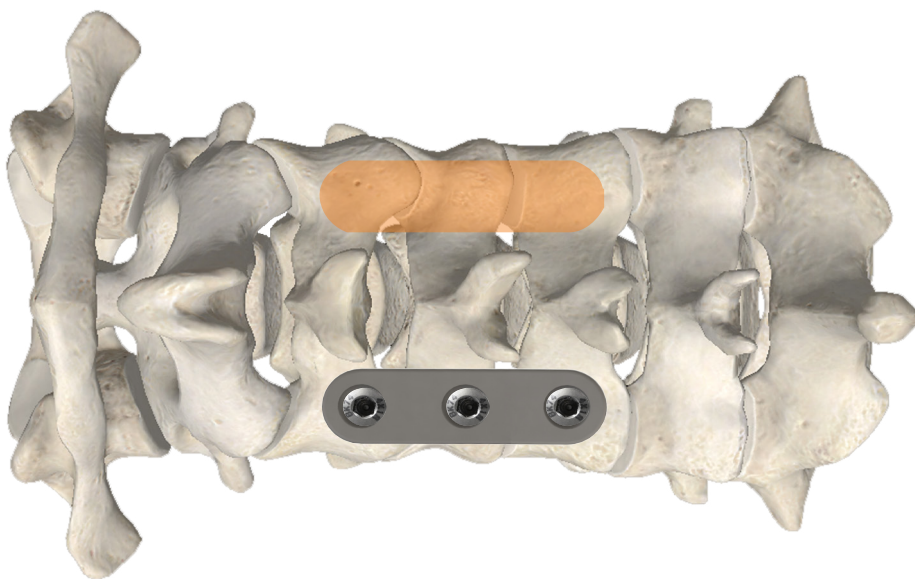

PASSO 5

A primeira Placa STABILAR® PCP é corretamente instalada.

Repita os passos 1 a 4 para instalar a segunda Placa STABILAR® PCP.

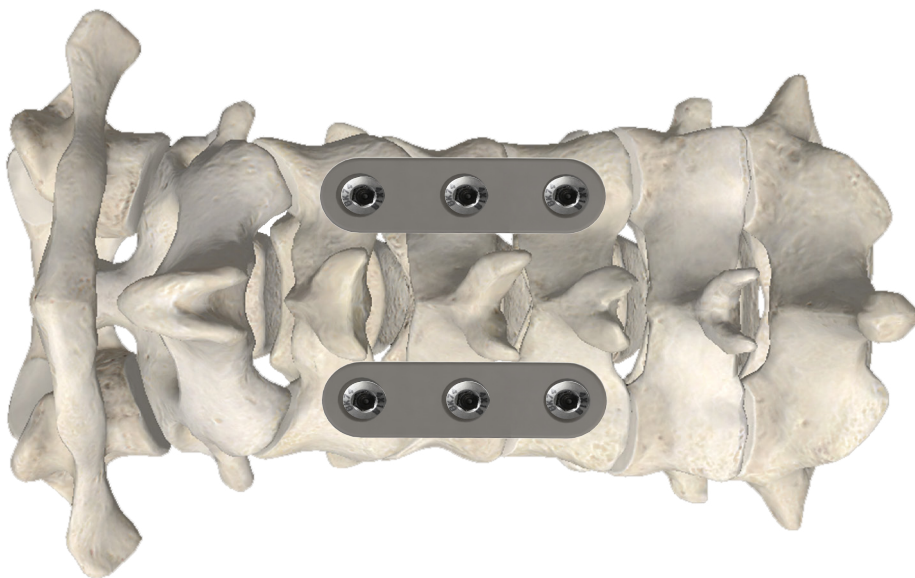

O sistema STABILAR® PCP está corretamente instalado.


9

IMPLANTES

STABILAR® PCP



PLACA STABILAR® PCP
Item n° : 480XXX

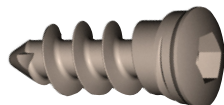

PARAFUSO STABILAR®
Item n° : 1140XX



Chave Hexagonal com Pinça de Ø
2,5 mm para Parafuso STABILAR®
Item n° : 010400



Iniciador Cervical com Bloqueio
Item n° : 014103



Modelador de Placa Cervical
Item n° : 011240



Pinça para Parafuso
Item n° : 010412

Your partner in spine surgery

NEURO FRANCE Implants



Fabricante e designer de implantes par cirurgias de coluna
www.neuro-france.net

Distribuído por :



Av. Luiz Eduardo de Toledo Prado, nº 900, Sala 619/62, Vila do
Golf – Ribeirão Preto – SP, CEP: 14027250
Tel : (16) 3904-3838 - E-mail: comercial@morebr.com.br
www.morebr.com.br



more4experts



ESCANEE O
Q-R CODE PARA
visitar o
nosso **SITE**

Faça o **DOWNLOAD** de um aplicativo **LEITOR DE QR CODE** para ler este código.